



QUICK START Essential duo


REF203159

MONTAGE DU KIT TÉTERELLE 3D

Montage de la tétérelle

Insérez le coussinet en silicone (2) dans la cloche (3).

N'oubliez pas de retirer la protection anti-poussière (1) avant d'utiliser votre tire-lait.

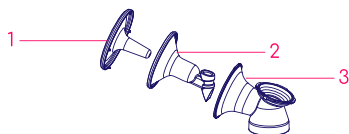


Positionnement de la valve 1/2 sphère et du flacon

Positionnez la valve 1/2 sphère (4) dans l'ouverture supérieure de votre cloche.

Vissez le capuchon (5).


Vissez la cloche sur le flacon de recueil (6).

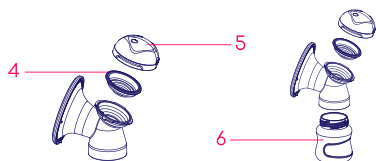

Utilisation simple / double pompage

Pour une utilisation en simple pompage, connectez directement la tétérelle.


Pour une utilisation en double pompage, connectez les tétérelles au raccord Y.

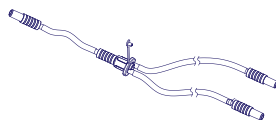

Connexion du tube et branchements


Connectez les extrémités des tubes aux kits tétérelles et au moteur du tire-lait.

Assurez-vous que le tire-lait et les kits soient correctement assemblés.

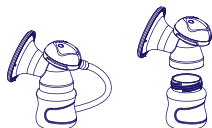



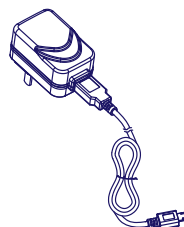

Branchement



Pour utiliser le tire-lait Essential duo, branchez le à une prise secteur ou une prise USB.



Utilisation

- 1 Positionnez le(s) kit(s) téterelle(s) sur votre poitrine, en plaçant le mamelon bien au centre.
- 2 Allumez le tire-lait avec le bouton 
- 3 Le tire-lait démarre en mode Stimulation 
- 4 Après 2 min, appuyez brièvement sur  pour changer de mode, et passez en mode Expression 

Conseils

- 1 Avec les boutons  et , réglez la puissance d'aspiration.
- 2 Pour un tirage optimal, réglez votre force d'aspiration au maximum de ce que vous pouvez supporter : cela ne doit pas être douloureux, et rester confortable.

PRÉSENTATION DE L'ÉCRAN

