


MODE D'EMPLOI Seinbiose Double



A. ASSEMBLAGE DES SETS DE POMPAGE


1. MONTAGE DE LA TÉTERELLE

Insérez le coussinet en silicone (2) dans la téterelle (3). N'oubliez pas de retirer la protection anti-poussière (1) avant d'utiliser votre tire-lait.

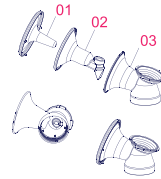

2. POSITIONNEMENT DE LA VALVE ½ SPHÈRE

Positionnez la valve ½ sphère (4) dans l'ouverture supérieure de votre téterelle. Vissez le capuchon (5) afin d'éviter toute fuite d'air.

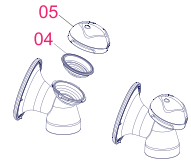

3. MONTAGE DU FLACON

Vissez la téterelle sur le flacon de recueil (6).




Répétez les étapes afin d'assembler le deuxième set de pompage.

B. ASSEMBLAGE DU TIRE-LAIT

CONNEXION DU TUBE ET BRANCHEMENT

Connectez une extrémité du tube au set de pompage, et l'autre au moteur du tire-lait, comme illustré. Faites de même avec l'autre tube et set de pompage. Connectez ensuite le câble de l'adaptateur au moteur du tire-lait et branchez l'adaptateur dans une source d'alimentation.

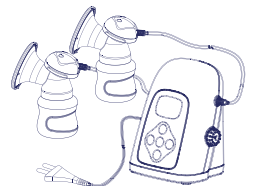

C. COMMENT UTILISER LE SEINBIOSE DOUBLE

1. DÉMARRER VOTRE TIRE-LAIT : BRANCHEMENTS

Si vous utilisez votre tire-lait sur secteur :

- Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant standard. Lors du branchement, le rétroéclairage et l'écran LCD s'allument pendant **2 secondes**. Puis l'écran LCD s'éteint.

Si vous utilisez votre tire-lait sur batterie :

- Vérifiez que les piles soient adaptées.
- Connectez une extrémité du tube au kit téterelle et l'autre au tire-lait.
- Placez les téterelles sur vos seins, le mamelon bien au centre.
- Veillez à bien plaquer vos téterelles contre vos seins tout au long de la séance afin de ne pas laisser passer d'air. Il est cependant inutile d'exercer une pression trop forte.



1. Bouton de Stimulation / Expression
2. Augmenter le niveau d'aspiration
3. Bouton pause
4. Bouton marche /arrêt
5. Diminuer le niveau d'aspiration

EN MODE STIMULATION, L'ÉCRAN LCD AFFICHERA L'ICÔNE ☺
EN MODE EXPRESSION, L'ÉCRAN LCD AFFICHERA L'ICÔNE ♡

2. PHASE DE STIMULATION

Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Il est à noter que pendant cette phase, le lait ne coule pas encore ou, selon les femmes, en très faible quantité.

3. PHASE D'EXPRESSION

- Après deux minutes, si aucun bouton n'a été touché, le tire-lait passera automatiquement du mode stimulation au **niveau 4** du mode expression.
- Cependant, si vous pressez le bouton stimulation/expression avant deux minutes d'utilisation, le tire-lait basculera au **niveau 1** du mode expression.
- La pompe fonctionnera automatiquement pendant **30 minutes**.
- Cependant, le tire-lait peut être arrêté manuellement en appuyant sur le bouton **marche/arrêt**.
- Pour un tirage optimal, réglez votre force d'aspiration au maximum de ce que vous pouvez supporter : cela ne doit pas être douloureux, et doit rester confortable.
- **En modes stimulation et / ou expression**, il est possible d'augmenter et / ou diminuer le niveau d'aspiration à l'aide des boutons + et -